



Nieuwstraat 28 5421 KP Gemert
T 0492 36 15 53 F 0492 36 85 39
E info@DeVoetspecialist.nl



Behandelingen uitsluitend op afspraak, op deze afspraken staat een maximale wachttijd van 20 min. (evt. uitloop van een spreekuur).



Tevens bestaat de mogelijkheid tot behandeling in het Elkerliek ziekenhuis te Deurne. Bezoek aan huis is mogelijk; hier worden extra kosten voor

berekend. Verder meten wij op diverse zorgcentra aan in de gehele regio. Informatie hiernaar bij onze medewerkers.



www.DeVoetspecialist.nl

MET ZORG VOORUIT

Verenigingen

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en het internationale ISPO.

Erkenningsregeling Orthopedisch Schoentechnische bedrijven en Podotherapie



Uiteraard zijn wij een erkend bedrijf. In het kort betekent dit dat er naast eisen en criteria met betrekking tot vakbekwaamheid en het bedrijfsproces ook een groot aantal waarborgen voor cliënten zijn gekomen, met name op het gebied van voorlichting, kwaliteit en nazorg. Jaarlijks worden wij hiervoor getoetst. Op deze manier bent u verzekerd van de kwaliteit en zorg waar u recht op heeft.

Openingstijden:

Ma: gesloten
Di: 08:30 – 12:30 en 13:15 – 17:30
Wo: 08:30 – 12:30 en 13:15 – 17:30
Do: 08:30 – 12:30 en 13:15 – 17:30
Vr: 08:30 – 12:30 en 13:15 – 20:00
Za: 08:30 – 12:30

Buiten deze tijden kunt u een antwoordapparaat inspreken of mailen met info@devoetspecialist.nl



Handleiding en tips voor gebruik en onderhoud van

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

SERVICEPAS

Leverdatum

Vervolgafspraak



Allround gediplomeerd en lid van NVOS, NVvP, ISPO en SEMH-erkend.
Moderne orthopedische schoenen, podotherapie, podologie, arthrodesebekers, protheses, ortheses, dynamische beugels, sportzolen, steunzolen, speciaalschoenen, semi-orthopedische schoenen, schoenaanpassingen en voethulpmiddelen.

www.DeVoetspecialist.nl

MET ZORG VOORUIT

Handleiding en tips voor gebruik en onderhoud van

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN



Garanties

Uw nieuwe schoenen zijn vakkundig vervaardigd volgens de laatste richtlijnen voor orthopedisch schoeisel. Het is logisch dat wij op een dergelijk kwaliteitsproduct goede garanties verstrekken. In het kort zijn deze als volgt:

- 3 maanden op pasvorm bij gelijkblijvende situatie
- 6 maanden op materiaal en technische kwaliteit bij normaal gebruik

Slijtage door gebruik, ten gevolge van onzorgvuldig gebruik of sterk afwijkend looppatroon vallen niet onder deze garantieregeling. Naast de goede zorg en garantie kennen wij een vaste procedure voor uw klachten.

Controle

Nazorg is voor ons belangrijk. Laat daarom uw nieuwe schoenen controleren. Wij kijken of de pasvorm correct is en of u de schoenen op de juiste manier draagt en behandelt.

Inlopen

De bovenkant van uw nieuwe schoenen is gemaakt van hoogwaardig leer, dat zich geleidelijk aanpast aan de vorm van uw voeten. Het is daarom erg belangrijk dat u deze schoenen gedurende de eerste weken regelmatig draagt. U gebruikt hierbij het volgende inloopschema:

- Dag 1 en 2: 2 uur.
- Dag 3: 4 uur.
- Dag 4: 6 uur.
- Dag 5: 8 uur.
- Vanaf dag 6: gehele dag.

Mochten er tijdens deze inlooperperiode problemen ontstaan, bel ons dan voor advies of aanpassing.

Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt. Hierdoor krijgt transpiratievocht voldoende tijd om te worden afgevoerd. Als u nog geen wisselpaar heeft, neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen bekijken of u daarvoor in aanmerking komt. Meestal mag dit na 3 maanden, na verstrekking van uw eerste paar.

De gemiddelde levensduur van het product bedraagt ongeveer 15 maanden bij normaal regulier gebruik.

Onderhoud

Poets uw schoenen zeker één keer per week om het leer in perfecte staat te houden. Behandel uw schoenen ook regelmatig met een water- en vuilafstotend middel. Gladde leersoorten onderhoudt u met een goede schoencrème, suède en nubuck leersoorten dient u regelmatig te borstelen en in te spuiten met een protector. Ontstaan er desondanks vlekken, laat deze dan door ons deskundig behandelen. Gaan uw schoenen na verloop van tijd hinderlijk kraken dan kunt u dit oplossen door wat talkpoeder tussen voetbed en binnenzool te strooien.

Ritsssluitingen / klittenband

Om een ritsssluiting soepel te laten lopen kunt u deze insmeren met zeep, kaarsvet of bijenwas. Ook wordt hiervoor vaak teflonspray gebruikt. Schoenen met klittenband dient u te sluiten als ze niet gebruikt worden.

Transpiratie

Het dragen van vaak hooggesloten orthopedische schoenen kan transpiratie verergeren. Enkele maatregelen om dit te verminderen zijn:

- wissel regelmatig van schoenen.
- draag katoenen of wollen sokken/kousen en verschoon deze dagelijks.
- was regelmatig uw voeten.
- gebruik anti-transpiratie crème.

Mocht dit niet helpen, raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog.

Drogen

Laat uw schoenen nooit op of bij een warmtebron drogen, maar op een luchtige plaats. Erg natte schoenen drogen sneller met een prop papier erin.


Aan- en uittrekken

Maak de veters, het klittenband en/of de ritssluiting geheel los en gebruik een schoenlepel.

Reparaties

Wij adviseren u, ook in verband met garantie, de reparaties door ons te laten uitvoeren.

Wij wensen u heel veel baat bij en plezier met uw nieuwe schoenen.

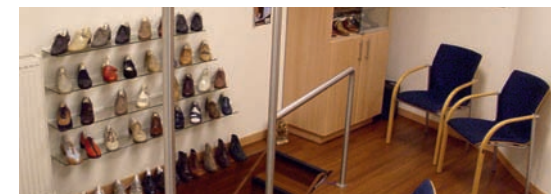

Verdere informatie

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent al deze onderwerpen kunt u te allen tijde terecht bij een van onze medewerk(st)ers op de vestigingen. Ook kunt u meer achtergrondinformatie over Voetinstituut Penninx vinden op het internet.

www.devoetspecialist.nl

www.DeVoetspecialist.nl

MET ZORG VOORUIT